
Käyttöohje

AT51111 Rollaattori



Sisällys

Yleistä	3
Ominaisuudet	3
Käyttötarkoitus	3
Huomioitavaa	3
Rollaattorin elinkaari	3
Vastuu	3
HUOM:	4
Symbolit	4
Yhteenveto tuotteesta ja toimituksen sisältö	4
Perustiedot rollaattorista	5
Rollaattorin kokoaminen käyttöä varten	6
Pyörien kiinnittäminen	6
Käsinojien korkeuden säätäminen	6
Kassi	7
Jarrut	7
Jarruvoiman lisääminen ja vähentäminen	7
Rollaattorin käyttäminen	8
Rollaattorin avaaminen ja kokoon taittaminen	8
Kuljettaminen ja varastointi	8
Etupyörät	9
Takapyörät	9
Rollaattorin kanssa liikkuminen	10
Polkaisuputki etupyörien keventämiseksi	10
Jarrut ja seisontajarru	10
Istuimen käyttäminen	11
Rollaattorin siirtäminen	11
Turvallisuusohjeita	11
Puhdistaminen ja desinfiointi	11
Puhdistaminen	11
Desinfiointi	12
Uusi käyttäjä	12
Hävittäminen	12
Tekniset tiedot	13

Yleistä

Nämä ohjeet auttavat sinua tutustumaan rollaattoriin ja käyttämään sitä. Nämä ohjeet ovat olennainen ja erottamaton osa tuotetta. Ne tulee olla aina saatavilla ja ne pitää antaa uudelle käyttäjälle. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

Ominaisuudet

Pyörällinen rollaattori AT51111 on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Se on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle. Rollaattorilla ei saa kuljettaa eikä sen päällä saa istua useampia ihmisiä. Mikäli tässä ohjeessa ei toisin mainita, kaikki sisältö on käyttäjää varten.

Käyttötarkoitus

Rollaattori on tarkoitettu henkilöille, joiden liikkuminen on heikentynyt, mutta joilla on riittävä kyky, voima ja tasapaino itsenäiseen ja turvalliseen rollaattorin käyttöön.

Huomioitavaa

Rollaattorin käyttö ei ole suositeltavaa, mikäli käyttäjällä on:

- ongelmia havaintojen tekemisessä
- merkittäviä tasapaino-ongelmia
- ongelmia käsien käyttämisessä
- ongelmia istumisen kanssa

Rollaattorin elinkaari

Rollaattorin laskettu käyttöikä on viisi vuotta edellyttäen, että sitä on käytetty näiden ohjeiden mukaan ja ylläpidetty asianmukaisesti ja turvallisesti. Mikäli rollaattori on edelleen hyvässä kunnossa, sen käyttöä voi jatkaa tämänkin jälkeen.

Vastuu

Valmistaja vastaa rollaattorin turvallisuudesta, luotettavuudesta ja soveltuvuudesta ainoastaan jos siihen tehdyt muutokset, huollot ja korjaukset on tehnyt valmistajan valtuuttama taho ja rollaattoria on käytetty vain näiden ohjeiden mukaisesti.

HUOM:

Rollaattorin käyttämiseen, kokoon taittamiseen, avaamiseen ja säätämiseen liittyy vaara siitä, että jokin ruumiinosa tai esine jää puristuksiin osien väliin.

Ole erittäin varovainen suorittaessasi niitä toimenpiteitä.

Kun säädät rollaattoria, pidä huolta, että kiristät kaikki ruuvit ja mutterit säätämisen jälkeen.

Symbolit



Tärkeä tieto! Turvallisuuteen liittyvä tieto.

Laiminlyönti voi johtaa vammaan tai laitteen rikkoutumiseen.



Tieto! Tärkeä tieto.



Noudata käyttöohjetta.



CE-merkintä

Yhteenvedo tuotteesta ja toimituksen sisältö

- Tarkasta tuote sen saapuessa
- AT51111 toimitetaan koottuna pakkauksessa. Säilytä pakkaus, myöhempää käyttöä tai varastointia varten, mikäli mahdollista.
- Varmista, että rollaattori on täydellinen ja hyvässä kunnossa. Mikäli rollaattori on rikkoutunut, älä käytä sitä ja ole välittömästi yhteydessä myyjään.

• Toimituksen sisältö

- 1 laatikko
- pyörällinen rollaattori selkänojalla ja polkaisuputkella
- verkkokassi, jossa on heijastin ja vetoketju
- 2 pehmustettua käsikahvaa
- käyttöohjeet

• Mallista riippuen

- LED-valo
- kuljetuspakkaus
- tarjotin



Perustiedot rollaattorista

- 1 Selkänoja
- 2 Laukku
- 3 Etupyörien kiinnitys
- 4 Etupyörät (kääntyvät)
- 5 Jarruvaijerin säätö
- 6 Takapyörä
- 7 Polkaisuputki
- 8 Takapyörien kiinnitys
- 9 Istuin
- 10 Ei kuvassa
- 11 Korkeuden säätö
- 12 Jarrukahva
- 13 Käsikahva
- 14 Takapyörien kiristysruuvit



Rollaattorin kokoaminen käyttöä varten

Rollaattori toimitetaan taitettuna pienimpään kokoonsa. Käyttöä varten sen pyörät tulee laittaa paikalleen ja käsinojien sekä käsinojat säätää oikealle korkeudelle.



Pyörien kiinnittäminen

Pyörät tulee kiinnittää paikalleen ennen käyttöä. Jos olet epävarma, pyydä asiantuntijaa auttamaan.

Kun kiinnität etupyörät runkoon, varmista, että lukitusnappi (3) lukitsee ne paikoilleen. Nappi myös vapauttaa pyörät, kun ne halutaan irrottaa säilytystä tai kuljetusta varten.

Takapyörien runko työnnetään rollaattorin runkoon (8) ja lukitaan ruuvilla (14). Varmista, että pyörät ovat tukevasti kiinni. Takapyörät irrotetaan kuljetusta varten käänteisessä järjestyksessä

Tarkat ohjeet pyörien kiinnittämiseen ja irrottamiseen ovat jäljempänä tässä ohjeessa kohdassa kuljettaminen ja varastointi.

Käsinojien korkeuden säätäminen

Käsinojien korkeuden säätäminen tapahtuu pikalukon avulla. Paina kuvan punaisen ympyrän sisällä näkyvää nappia rungon sisään. Käsinojia voi nostaa ylös ja laskea alas niin pitkään, kun lukitusnappi on painettuna. Kun käsinoja on säädetty sopivalle korkeudelle, päästä nuppi ja varmista, että käsinoja on tukevasti kiinni. Tee sama toiselle puolelle ja varmista, että käsinojat ovat samalla korkeudella.



Kassi

Rollaattorin mukana tulee kassi. Sille on kiinnikkeet istuimen selkänojan puolella.



Rvs. 4:





Jarrut

Jarrujen säätäminen vaatii osaamista. Voit säätää ne itse vain, jos sinulla on siihen soveltuva osaaminen. Muussa tapauksessa anna se ammattilaisen tehtäväksi.

Jarruvoiman lisääminen ja vähentäminen

Jarruvaijerin kireyden karkeasäätö tapahtuu löysäämällä kuuriokoloruuvia (1) ja siirtämällä vaijeria (2). Kuva oikealla

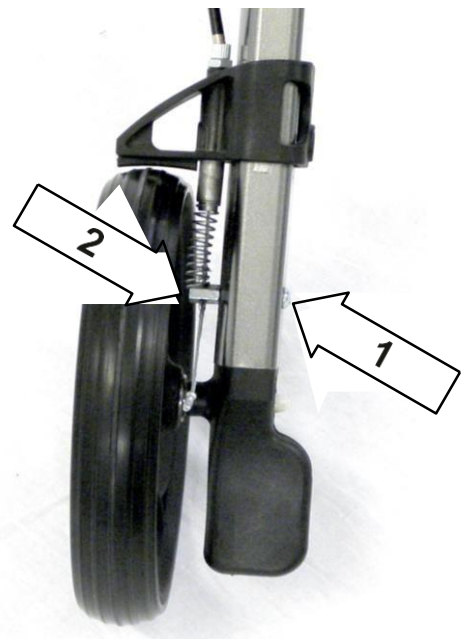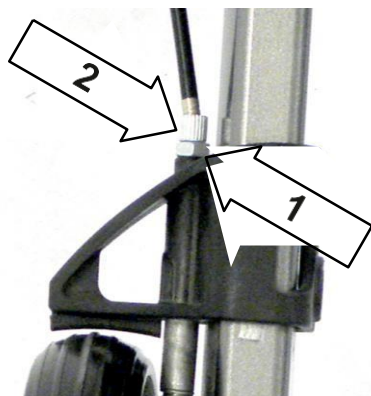

Jarruvaijerin hienosäätö tapahtuu ensin löysäämällä kiristysmutteria (1) ja sitten kiertämällä holkkia (2). Kun pituus on sopiva, kiristä mutteri (1). Kuva yläpuolella. Toista sama toiselle jarrulle.

Jarrujen kireys tulee säätää niin, että renkaat pyörivät vapaasti laahamatta ja seisontajarru pitää rollaattorin paikallan.

Rollaattorin käyttäminen



Varo ettei mitään jää rollaattorin osien väliin avatessasi ja kokoon taittaessasi sitä tai valmistellessasi sitä kuljettamista varten.

Rollaattorin avaaminen ja kokoon taittaminen

Rollaattorin voi taittaa kokoon tilan säästämiseksi.

Rollaattori avataan käyttökuntoon levittämällä sen ristikkorunko auki ja sen jälkeen painamalla molemmista sivuilla olevista istuimen runkoputkista voimakkaasti alas kuvan mukaisesti. Rollaattorin alaosassa on lukitus, joka estää rollaattoria sulkeutumasta vahingossa. Rungon lukon äänen kuulee sen mennessä päälle. Rungon saa taitettua kokoon nostamalla istuimen keskellä olevasta kahvasta.



Vasen:
Rollaattorin lukitseminen
käyttöasentoon



Oikea:
Rollaattorin taittaminen kokoon

Kuljettaminen ja varastointi

Rollaattorin kuljettamisen ja varastoinnin helpottamiseksi se voidaan taittaa ja purkaa hyvin pieneen tilaan ilman työkaluja



Etupyörät

Etupyörät on lukittu käyttöasentoon oranssisella napilla. Lukitus avataan painamalla nappia. Sen jälkeen etupyörän voi vetää ulos ja kääntää 180 astetta ylöspäin

Käyttöasentoon laittamien tapahtuu kääntämällä pyörät käyttöasentoon. Kun pyörät ovat oikeassa asennossa, ne lukittuvat paikalleen. Varmista, että nappi lukittuu ja pyörät on tukevasti kiinni.



Takapyörät

Avaa takapyöriä kiinni pitävä ruuvi ja vedä pyörän varsi ulos rungosta.

Muista, että jarruvaijeri yhdistää pyörän ja rollaattorin joten älä vedä pyörää liikaa.

Takapyörät laitetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Varmista, että pyörät kiinnittyvät tukevasti ja että jarrut toimivat.



Rollaattorin kanssa liikkuminen

Tarkista aluksi rollaattorin toiminnon kuivalla, vaakasuoralla ja tasaisella pinnalla. Jos mahdollista, pyydä apua toiselta henkilöltä. Aloittaessasi rollaattorin käyttöä, on tärkeä ensin perehtyä kaikkiin toimintoihin. Vasta saatuaasi tarpeeksi kokemusta, voit siirtyä pois vaakasuoralta pinnalta.



Kun liikut rollaattorilla, pysy kahvojen lähellä. Se on ainoa tapa saada tukea rollaattorista. Älä liiku kumarassa.

Rollaattorin suuntaan ja nopeuteen vaikutetaan työntämällä sitä. Käytä tarvittaessa jarruja vauhdin hidastamiseen. Käytä aina molempia jarruja samaan aikaan jotta rollaattori ei käännä yllättäen ja aiheuta kaatumista.

Vältä eteen tulevia esteitä. Jos eteen tulee porras tai portaat, etsi ramppi tai hissi, jota käyttämällä voit kiertää ne. Rollaattorilla ei tule ylittää esteitä. Pyydä tarvitteassa apua.

Polkaisuputki etupyörien keventämiseksi

Rollaattorin takarungon päässä on levyt, joita jalalla painamalla helpotetaan etupyörien nostamista katukivetyksen päälle. Paina jalalla levyä ja vedä samalla käsikahvoista, niin saat etupyörät nousemaan. Muista säilyttää tasapaino



Jarrut ja seisontajarru

Rollaattorin takapyörissä on käyttöjarrut sekä seisontajarrut tahattoman liikkumisen estämiseksi.



Jarrua käytetään puristamalla jarrukahvoja käsikahvoja kohden.

Jarrituksen voima riippuu puristuksen voimasta

SEISONTAJARRU



Seisontajarrua käytetään painamalla jarrukahvoja alas kunnes ne lukittuvat. Seisontajarru vapautuu nostamalla kahvoja.

Istuimen käyttäminen

Kytke aina seisontajarru päälle, kun siirryt istumaan tai nouset ylös etei rollaattori pääse liikkumaan. Pidä seisontajarru päällä istuessasi rollaattorissa.

Istuimessa ei saa käyttää ylimääräisiä tyynyjä tai pehmusteita koska ne voivat luistaa ja aiheuttaa putoamisen.

Rollaattorin siirtäminen

Kun siirät tai nostat rollaattoria esimerkiksi katukivetyksen yli, sen pitää aina olla taitettuna kokoon. Rollaattoria saa nostaa vain rungosta tai käsikahvoista.

Muista varoa ettei mitään jää rollaattorin mekanismin väliin sitä taitettaessa.

Turvallisuusohjeita

Tarkasta ennan jokaista käyttöä, että rollaattori on ehjä ja että jarrut toimivat.

Rollaattoria ei saa käyttää rullaportaissa koska kaatumisvaara on suuri.

Rollaattori on tehty paloa ylläpitämättömistä materiaaleista.

Suurin käyttäjän paino on 136 kg ja suurin kassin kuorma 5 kg. Rollaattoria ei saa käyttää tavarankuljettamiseen. Kassia ei ole tehty eläinten kuljettamiseen.

Rollaattorin voi taittaa kokoon tilan säästämiseksi. Rollaattorin käyttämiseen, kokoon taittamiseen, avaamiseen ja säätämiseen liittyy vaara siitä, että jokin ruumiinosa tai esine jää puristuksiin osien väliin.

Taittaessasi rollaattoria älä vedä tai nosta vain osista, jotka eivät ole kiinteästi rungossa (kassi, jarrut, jarruvaijerit, pyörät jne...). Käsittele rollaattoria vain rungosta.

Aurinko saattaa kuumentaa rollaattorin istuimen tai muut osat hyvin kuumiksi. Suojaa siksi rollaattori suoralta auringonvalolta.

Puhdistaminen ja desinfiointi

Puhdistaminen

Rungon voi puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Pinttyneeseen likaan voi käyttää mietoja pesuaineita.

Renkaat voi puhdistaa kostealla muoviharjalla. Älä käytä metalliharjaa.

Istuimen, selkänojan ja laukun voi pestä vedellä ja miedolla pesuaineella.



Älä puhdisti höyry- tai painepesurilla!

Puhdistamisen jälkeen rollaattori pitää kuivata pyyhkeellä ja antaa kuivua.

Desinfiointi

Rollaattorin voi desinfioida yleisillä kotikäyttöön tarkoitetuilla desinfiointiaineilla. Hyväksytyjä alkoholipohjaisia suihkeita tai pyyhkeitä voi käyttää siihen tarkoitukseen.

Desifioinnin jälkeen anna rollaattorin kuivua. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Uusi käyttäjä

AT51111 rollaattorin voi antaa uudelle käyttäjälle. Vaihdon yhteydessä rollaattori pitää puhdistaa ja desinfioida ohjeiden mukaisesti.

Uuden käyttäjän pitää saada rollaattorin käyttöohjeet ja muut tarpeelliset tiedot.

Rollaattorin kunto pitää tarkastaa ja se pitää kuljettaa asianmukaisesti.

Hävittäminen

Rollaattori tulee hävittää voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Materiaalit tulee kierrättää paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Tekniset tiedot

Mitat ja paino	
Istuimen leveys	450 mm
Istuinkorkeus	540 mm
Kokonaisleveys	653 mm
Total length	706 mm
Kokonaiskorkeus	810 – 936 mm
Käsinojilla 6 korkeusasetusta	
Paino ilman kuormaa ja varusteita	7,85 kg
Suurin kuorma	136 kg
Suurin kuorma laukussa	5 kg
Mitat kokoon taitettuna	706 x 250 x 810 mm (D x Sz x W)
Pyörät (suojien kanssa)	
Etupyörät, ohjaavat	250 x 35 mm
Takapyörät, kiinteät, jarrulliset	210 x 35 mm
Kääntösäde	1770 mm
Materiaalit	
Runko	Alumiini (korroosiosuojattu)
Istuin	Nylon, musta
Selkänoja	Nylon, musta
renkaat	Polyuretaania
Käyttöolosuhteet	
Lämpötila	0 - 50 °C
Kosteus	20 - 80 %
Varastointi	
Lämpötila	-20 - + 60 °C
Kosteus	45 - 60 %