



SteriFeed


Caring for your baby

Yhden käyttäjän imukartiokokonaisuus

Tuotekoodi 10091, 10092

Yhteensopiva laitoskäyttöön tarkoitettujen rintapumppujen kanssa

Lue ohjeet ennen käyttöä

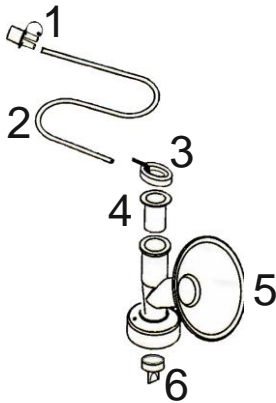

1. Liitin
2. Imuletku
3. Imukartion kansi
4. Silikonikalvo
5. Imukartio
6. Venttiili



Käyttöohje

- Lue ensin rintapumpun käyttöohje.
- Kokoa imukartiokokonaisuus kuvan mukaisesti ja laita se kiinni pulloon.
- Laita kartio niin, että nänni on sen keskellä.
- Paina kevyesti niin, että kartio on ilmatiiviisti.
- Säädä imu rintapumpun ohjeiden mukaisesti ja pidä imukartiota pystyssä niin, että maito valuu pulloon.

Puhdistusohje

- Käytön jälkeen vain osat 4, 5 ja 6 tarvitsevat puhdistusta (katso kuva).
- Pese osat lämpimässä saippuavedessä tai astianpesukoneessa. Steriloi ne sen jälkeen höyrysteriloijalla, mikroaaltouunisteriloijalla, kylmällä vedellä, jossa on sterilointiainetta, keittämällä osia kiehuvaassa vedessä 10 min tai autoklaavissa 121C 20 min/134C 5 min.
- Kuivaa osat hyvin ja laita ilmatiiviiseen astiaan.
- Osia 1, 2 ja 3 ei tarvitse pestä/steriloida koska ne eivät ole yhteydessä maitoon.

Pidä nämä ohjeet tallessa tulevaa tarvetta varten

Tämä maidonkeräysjärjestelmä on **steriili** paitsi jos pakkaus on avattu tai se on vaurioitunut. Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on rikki. Hygieniasyistä tätä tuotetta ei saa milloinkaan jakaa äitien kesken eikä myydä äidiltä toiselle.

