

RECA care-anaalitamponi

Kertakäyttöinen anaalitamponi ulosteinkontinenssin estämiseksi

RECA care-anaalitamponi on täydellinen vaihtoehto tavanomaisille ulosteinkontinenssisuojille. Se korvaa sisäisen sulkijalihaksen toiminnan taaten käyttäjälleen varmuuden kaikissa tilanteissa. Yksilölliset muodot ja seitsemän eri kokoa antavat valinnanvaraa, jota ei aiemmin ole ollut tarjolla.


RECA care-anaalitamponi on käytössä huomaamaton. Se vähentää epämiellyttäviä hajuja, mutta päästää kaasut lävitseen.

Oikean koon valinta ja käytön aloittaminen

RECA caren laaja valikoima tarjoaa yksilöllisen käyttäjäkokemuksen. Sopivan koon valinta aloitetaan pienimmästä tamponikoosta. Jos se työntyy ulos peräaukosta tai ei estä ulosteen tuloa, tamponi on liian pieni. Tällöin siirrytään seuraavaan kokoon. Kokeilua jatketaan, kunnes tamponi tuntuu sopivalta. Sopivan koon löydyttyä sitä tulisi suojan varmistamiseksi kokeilla normaaleissa tilanteissa, kuten kotiaskareissa, pyöräillessä tai urheillessa tms.

Anaalitamponin käytön alussa mahdollisesti tuntuva paine on normaalia ja osittain myös psykologisten tekijöiden aiheuttamaa. Tamponin käyttöön kuitenkin tottuu nopeasti, jolloin myös tuntemukset katoavat.

Anaalitamponin asettaminen:

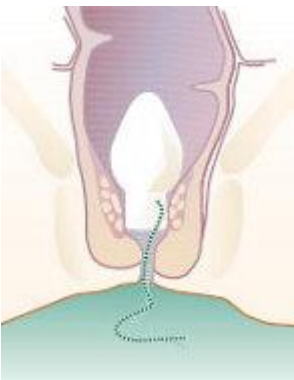

1. Pese kätesi huolellisesti. Kierrä anaalitamponin lanka auki ja poista mahdollinen suojamuovi.
2. Pehmennä RECA care-anaalitamponi lämpimässä vedessä minuutin ajan. Purista neste pois. Halutessasi voit liukastaa tamponia esim. vaseliinilla, perusvoiteella tai muulla liukasteella.
3. Liukasta asettimen pää ja kiinnitä se tamponin lankapuolella näkyvään koloon (liukasteen ansiosta asetin on helppo irrottaa tamponista).
4. Valitse mukava ja itsellesi parhaiten soveltuva asento esim.
 - a. selinmakuulla polvet koukussa
 - b. istuaaltaan wc-pöntöllä
 - c. seisaaltaan toinen jalka tuolilla
5. Laita anaalitamponi peräsuoleen siten, että lanka jää ulkopuolelle. Kun tamponi on paikallaan, vedä asetin ulos (sulkijalihaksen koskettaminen saattaa aiheuttaa puristusrefleksin. Jos niin käy, odota 8-10 sekuntia).
6. Poista RECA care-anaalitamponi vetämällä langasta.

Huomioitavaa:

- Ei sovellu käytettäväksi kuin kerran
- Halutessasi voit päällystää tamponilangan ihoystävällisellä laastarilla
- Poista anaalitamponi viimeistään 20 tunnin käytön jälkeen
- Tamponia ei tarvitse poistaa uudessa
- Tamponia ei tarvitse poistaa WC-käyntien yhteydessä
- RECA care-anaalitamponi voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana
- Mikäli anaalitamponien käytön aikana esiintyy kuumetta, pahoinvointia, ripulia, heikkoutta, ihottumaa tai muita selittämättömiä oireita, poista tamponi ja konsultoi hoitavaa lääkäriäsi

RECA care-anaalitamponeissa on seitsemän (7) eri kokovaihtoehtoa seuraavasti:

Tuotenro	Koko Ø / pituus mm	Tuotenro	Koko Ø / pituus mm
20/3	25/52	40/35	33/55
20/4	35/63	44/24	23/48
40/24	23/48	44/35	33/56
40/30	28/50	30/1 (asetin)	25/115

Valmistusmateriaali

Anaalitamponi: PVA-vahto
 Tamponilanka: keinokuitu
 Myyntiyksikkö: 50 kpl
 Valmistaja: RECA Med GmbH
 Saksa

CE 0197



Tutustu ohjeeseen ennen käyttöä



Kertakäyttöinen



Valmistaja:

RECA Med, Medical Care Products

Jakelu Suomessa:

MEDI10 OY
 office@medi10.fi
www.medi10.fi